

## タゴシッド TDM キット測定方法

1. 試薬パックを機器にセットします。
2. キャリブレータ及びコントロールのセットされたカローセルをのせ、アクセスドアを閉じます。
3. STOP を押します。  
REDAY が表示されます。
4. ASSAY \*\* RUN を押します。\*\*は TDxFLx の場合 92 TDx の場合 37 又は 49  
#= \_\_\_\_\_ が表示されます。
5. キーボードより 13 桁のバーコード\*を入力します。
6. STORE を押します。
7. 試薬パックのロット番号をプリントするようにプログラムされている場合は  
RGT # ? が表示されます。
8. ロット番号を入力し STORE を押します。  
CALIBRATION ? と表示されます。
9. キャリブレーションを実行する場合 STORE を押します。  
キャリブレーションをしない場合 NEXT を押します  
CAROUSEL #? と表示されます
10. カローセル番号を入力し STORE を押します。

\* 13 桁のバーコードは試薬添付のバーコード表に表示された番号を使用して下さい。