



2019年12月18日

お客様 各位

「Tau タンパク-IBL」 「pTau タンパク-IBL」
抗体プレート洗浄操作詳細について

拝啓 ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、「Tau タンパク-IBL」及び「pTau タンパク-IBL」の、抗体プレートの一次反応後、二次反応後の洗浄操作の詳細をご案内申し上げます。

なお製品仕様自体に変更はございません。今後共ご愛顧の程よろしく御願ひ申し上げます。

【抗体プレート洗浄操作詳細点】

製品コード 50161 「Tau タンパク-IBL」 認証番号：301ADEZX00053000 体外診断用医薬品

製品コード 50171 「pTau タンパク-IBL」 認証番号：301ADEZX00054000 体外診断用医薬品

抗体プレートの洗浄は機械洗浄（wait time 0 秒）を推奨いたします。
洗浄液をウェルに素早く満たした後、浸漬時間が短くなるよう速やかに洗浄液
を除去してください。この洗浄操作を規定回数おこなってください。

本件に関して、ご不明な点がございましたら、製品番号およびロット番号をお確かめの上、下記までお問合せ下さい。

敬具

【お問合せ先】

株式会社 免疫生物研究所 診断・試薬事業本部 営業部

〒375-0005 群馬県藤岡市中 1091-1

TEL : 0274-50-8666 / FAX : 0274-23-6055 E-mail : do-ibl@ibl-japan.co.jp